

Gebrauchsanleitung Scherengriffpumpe

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir beglückwünschen sie zum Kauf dieser Hochleistungsvakuumpumpe mit Druckregulierer und gut sichtbarem, schwarzen Ventil sowie Anschlusschläuchen.




Wir möchten sie darauf hinweisen, dass die Pumpe nur mit dem angeschlossenen Druckregulierer funktioniert, **die Seite mit integriertem schwarzen Ventil stets in Richtung Pumpe zeigen muss.**

Zum besseren Verständnis : Sie können, wenn sie den Regulierer (auch T-Stück) gegen das Licht halten sofort sehen, dass in einer Seite ein Ventil in Form eines Stopfens mit Blättchen integriert ist. Auch zeigt eine deutlich kleinere Öffnung im Gegensatz zur anderen Seite des Regulierers an, dass hier das Ventil sitzt.

Setzen sie dann auf beiden Seiten wieder die Anschluss-Schläuche auf und schließen sie den Regulierer mit der Ventil-integrierten Seite an die Pumpe an, die andere Seite an den entsprechenden Zylinder bzw. Schale.

Material-Vorteile und Gestaltung der Pumpe

Die Pumpe besteht aus Einzelteilen, hergestellt aus einem hochwertigen, transparenten Kunststoff.

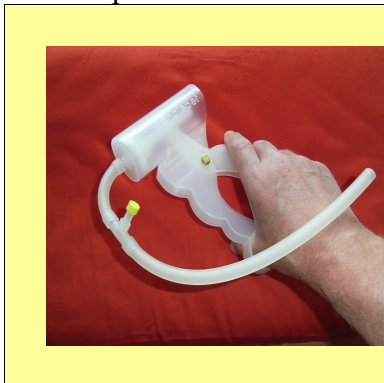

Aus hygienischen Gründen ist die Pumpe aus diesem transparenten Material hergestellt – also durchsichtig, sodass jeder Schmutzpartikel, der sich im Laufe der Zeit festsetzen sollte, gut sichtbar ist.

Diese Ablagerungen können u.U. eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit verursachen, diese lassen sich jedoch leicht in einem warmen Wasser-Spülmittel-Gemisch entfernen, indem sie die Pumpe darin einige Male betätigen. Sollte jedoch die Pumpe nach der Reinigung wider Erwarten doch nicht mehr richtig funktionieren, können Sie diese uns zum kostenlosen Austausch oder Instandsetzung zusenden

Senden sie die Pumpe an die unten angegebene Adresse. Senden sie die Pumpe bitte frei. Während der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab Kaufdatum, ersetzen wir Ihnen das Porto. Legen sie bitte eine Kopie des Kaufbeleges bei.

Wir hoffen in diesem Falle auf Ihr Verständnis und. wünschen Ihnen mit dieser Hochleistungsvakuumpumpe viel Erfolg beim Einsatz dieser Therapie mit ihrer Vielseitigkeit.

Sollten sie diese Pumpe irgendwann entsorgen, geben sie diese einfach in den Hausmüll.

Shop für Medizin, Naturheilkunde, Gesundheit, Wellness, medizinische Bücher, alles für die Frau, erektile Dysfunktion

Dieter Stockburger Am Oberen See 15 78056 VS-Schwenningen
Telefon: +49 7720 237 1256 Fax.+49 321 212 32699
<http://www.stockburgershop.de>